

キャニスター充填交換の手順

1 レンタル品の到着／ご利用開始

当会より専用輸送ケースに格納・施錠された状態で、キャニスターが届きます。
暗証番号「313」にて鍵を開けていただき、中身をご確認のうえご利用ください。

2 ガスが減少してきたら…／キャニスター再充填

使用前に、レギュレーターの圧力調整ノブを時計回りに全開まで回しても圧力0.2 MPaを超えなくなりましたら、事務局（info@h2-therapy.com）まで「キャニスター交換依頼」のメールをお送りください。

充填済みのキャニスター（交換品）をお送りいたします。

※キャニスターが完全に空になる前に交換してください。

3 交換品のお受取り／使用済みキャニスターの発送（着払い）

使用中のキャニスターは、圧力0.07 MPaを超えなくなったら使用を中止し、速やかにご返却ください。


※圧力が0になるまで使用しないでください。（内部に空気が混入し、超高純度維持に支障をきたすため）

充填交換費 5,500 円（送料込・税込）／1回

※沖縄県 6,600 円（送料込・税込）

使用済みキャニスターの発送方法

- レギュレーターを外し、キャニスターのみを専用の輸送ケースに入れてください。
- ケース2カ所のロック機構をしっかり閉めてください。
- ケースの両角にある穴どちらかに専用の鍵（南京錠）を掛け、ロックしてください。
※暗証番号「313」は絶対に変更しないでください。
- ケース外装に直接発送伝票を貼付け、着払いにて送付ください。

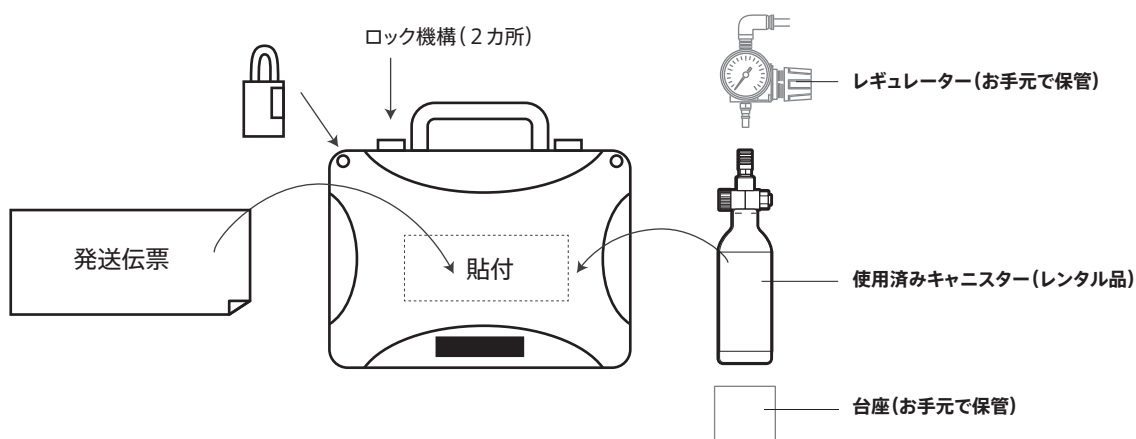

送り先: 〒102-0083
東京都千代田区麹町6丁目6-1 長尾ビル 7F
臨床水素治療研究会
TEL: 03-3221-6313
品名: 空キャニスター



一般社団法人
臨床水素治療研究会
ASSOCIATION OF CLINICAL HYDROGEN THERAPY