


水素キャニスター交換手順

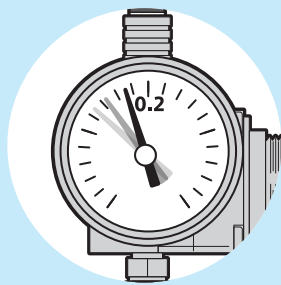

圧力が0.2MPaを超えなくなったら交換依頼

レギュレーターの圧力調整ノブを全開に回しても針が 0.2 MPa を超えなくなったら交換依頼のタイミング。

※圧力 0.07 MPa を超えなくなったら使用中止。

※圧力が0になるまで使用しない。(内部に空気が混入し、超高純度維持に支障をきたすため)



WEBお問合せフォームより交換依頼

WEBお問合せフォーム ▶



充填交換費 5,500 円 (税込) / 1 回

※沖縄県 6,600 円 (税込)

※弊社営業日AM11:00までのご依頼で、交換品を当日出荷予定。
(在庫状況により当日出荷ができない場合あり)



充填済キャニスターの受け取り

専用輸送ケースで充填済キャニスターが届く。

共通暗証番号で南京錠を開け、即日中に問題なく使えることを確認する。

共通暗証番号 **313**

⚠ 充填済キャニスターを受け取ったら使用済キャニスターを**3日以内**に返送

使用済キャニスターの返送


1



取り外したキャニスターにキャップをかぶせ、専用輸送ケースに入れる。

※キャニスターの元バルブが閉まっていることを確認


2

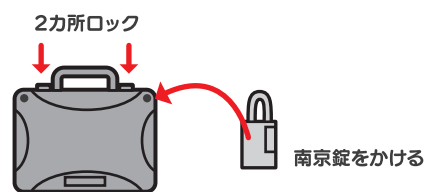

ケースのロック機構2カ所をしっかりと閉め、両角にある穴どちらかを南京錠でロックする。

※共通暗証番号313は絶対に変更しない

3

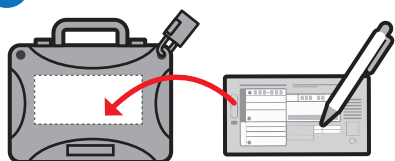

ケース外装に発送伝票を直接貼る

送り先: 〒105-0001 東京都港区虎ノ門5-3-3 神谷町プレイス 2E
臨床水素ミトコンドリア治療研究会
TEL: 03-6435-7150

品名: 空キャニスター (HC000)

※キャニスターのシリアルナンバー (HC から始まる 3 桁の数字) を記入

着払い