

キャニスター 充填交換の手順

1 レンタル品の到着／ご利用開始

当会より専用輸送ケースに格納・施錠された状態で、キャニスターが届きます。
暗証番号「313」にて鍵を開けていただき、中身をご確認のうえご利用ください。

2 ガスが減少してきたら...／キャニスター交換

使用前点検時に レギュレーターの圧力調整ノブを時計回りに全開まで回しても圧力0.2 MPaを超えなくなりましたら、当会（info@h2-therapy.com／Web問合せ）まで交換依頼のご連絡をください。

※ 交換依頼の際は、キャニスターのシリアルナンバー（HCから始まる3桁の数字）をお伝えください。

※ キャニスターが完全に空になる前に交換してください。

3 交換品のお受取り／使用済みキャニスターの発送（着払い）

当会より充填済キャニスターが届いたら、使用済みキャニスターを速やかにご返送ください。


※ キャニスターは圧力0.07 MPaを超えなくなったら使用を中止してください。

※ 圧力が0になるまで使用しないでください。（内部に空気が混入し、超高純度維持に支障をきたすため）

充填交換費 5,500 円（送料込・税込）／1回
※沖縄県 6,600 円（送料込・税込）

使用済みキャニスターの発送方法

- ① レギュレーターを外し、キャニスターのみを専用の輸送ケースに入れてください。
- ② ケース2カ所のロック機構をしっかりと閉めてください。
- ③ ケースの両角にある穴どちらかに専用の鍵（南京錠）を掛け、ロックしてください。
※暗証番号「313」は絶対に変更しないでください。
- ④ ケース外装に直接発送伝票を貼付け、着払いにて送付ください。

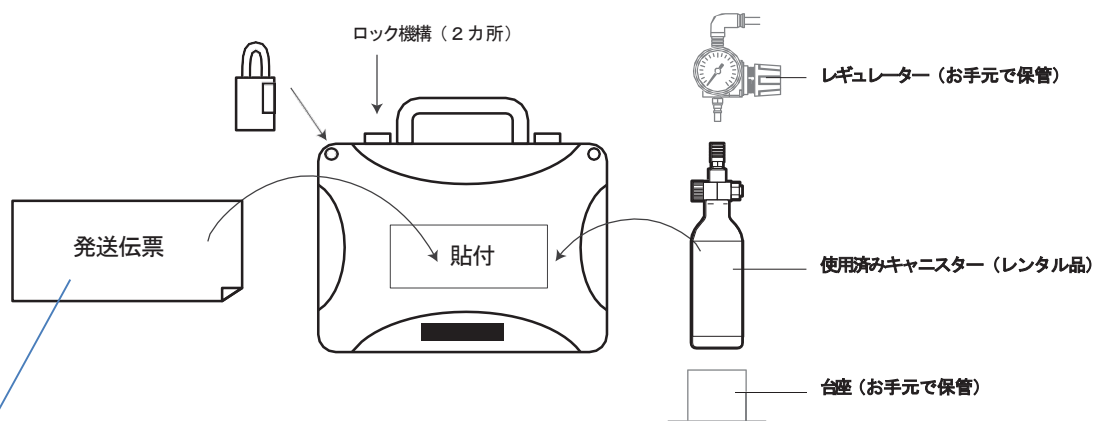

送り先：〒105-0001
東京都港区虎ノ門5-3-3 神谷町プレイス 2階2E
臨床水素治療研究会
TEL：03-6435-7150
品名：空キャニスター（No.〇〇〇）



一般社団法人
臨床水素治療研究会
ASSOCIATION OF CLINICAL HYDROGEN THERAPY